




Application mobile OneTouch Reveal®

Compatible avec les lecteurs de glycémie OneTouch Verio Reflect®
et OneTouch Select Plus Flex®

Configuration avec Android ou iOS



TÉLÉCHARGER
gratuitement l'application
OneTouch Reveal®

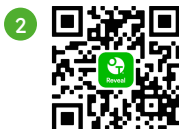

DÉCOUVRIR
l'application mobile
OneTouch Reveal®



CONNECTER
le lecteur de glycémie
OneTouch Verio Re lect®
à l'application
OneTouch Reveal®


ONETOUCH®

* Vidéos de démonstration.

Pour plus d'information, et avant toute utilisation, veuillez lire le manuel d'utilisation et la notice des produits.



Aide à l'autonomie et à la gestion facilitée de votre diabète avec l'application mobile OneTouch Reveal®

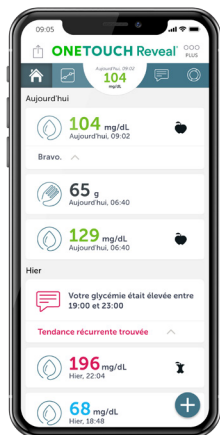

Carnet digital synchronisé

Synchronisation et organisation automatique des résultats de glycémie des lecteurs de glycémie OneTouch Verio Reflect® ou OneTouch Select Plus Flex®, pour une gestion simplifiée et fiable des événements de votre journée



Suivi facile de vos progrès

Compréhension facilitée des tendances glycémiques et visualisation synthétique des résultats, couplées à l'envoi de rappels et de notifications personnalisées. L'application mobile OneTouch Reveal® vous aide, selon les recommandations de votre médecin, à cibler les actions à mettre en oeuvre.



Partage simplifié des données avec votre équipe soignante

Partage des résultats glycémiques et de vos progrès avec votre équipe soignante (avec votre accord) visant à l'amélioration de votre prise en charge médicale*



* Avec votre accord et après consentement, différentes modalités pour le partage des résultats et des rapports glycémiques avec votre équipe soignante sont disponibles.



Configuration de l'application pour un smartphone sous Android

ETAPE 1

Télécharger l'application mobile OneTouch Reveal®




Vous avez un smartphone sous iOS ?
Rendez-vous à la page 10 pour la configuration.

A




Trouvez l'icône Google Play sur votre appareil Android


B

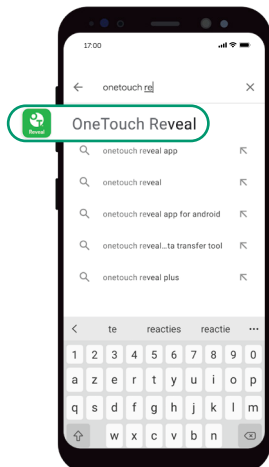


C

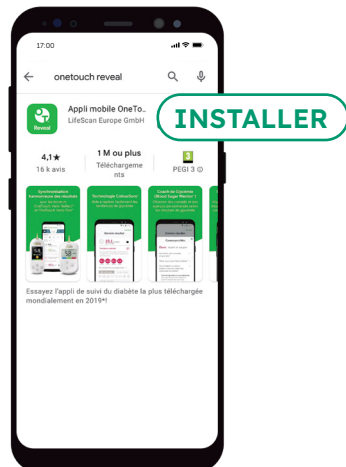

D

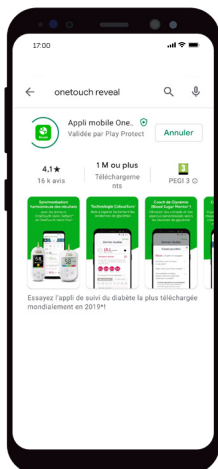


E

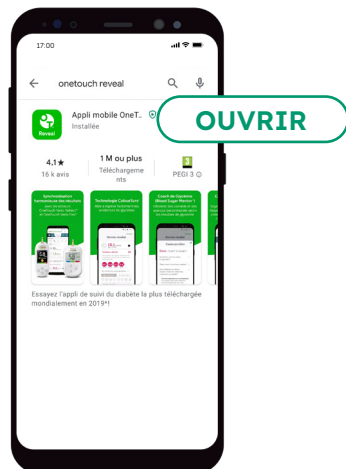




ETAPE 2


Créer un compte OneTouch Reveal® et compléter obligatoirement les informations suivantes :

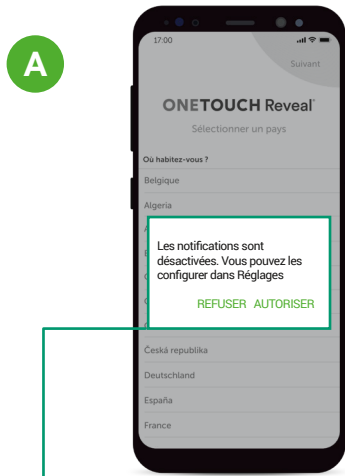


Vous avez le choix mais, afin de profiter au maximum des avantages de l'application mobile OneTouch Reveal®, sélectionnez « **Autoriser** ». L'application vous enverra des notifications.

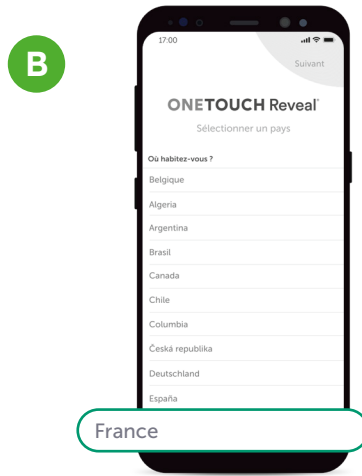

Choisir « **France** » comme Pays de résidence

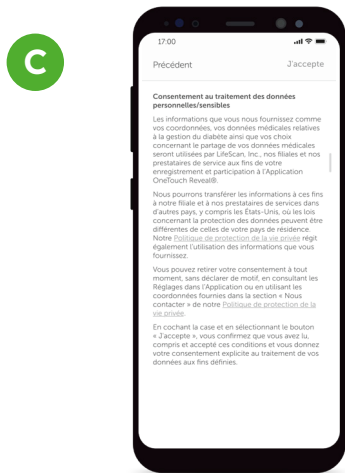

Accepter le « **Consentement au traitement des données personnelles/sensibles** »

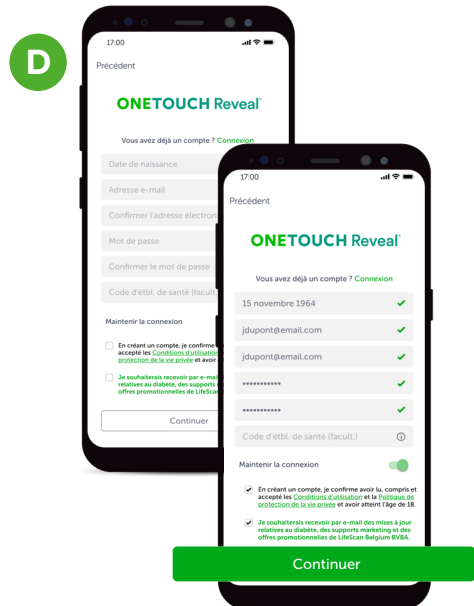




ETAPE 3

Connecter le lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect® ou OneTouch Select Plus Flex® avec l'application mobile OneTouch Reveal® par Bluetooth

Activer le Bluetooth du lecteur de glycémie

Sur un lecteur OneTouch Verio Reflect® :


- Allumer le lecteur avec un appui long sur **OK**
- Dans le menu lecteur, choisir **Réglages** puis **Bluetooth®**
- Sélectionner **Activé** et appuyer sur **OK**
- Appuyer sur le bouton retour ↵ pour retourner sur l'écran d'accueil du lecteur
- Le symbole  est allumé en haut à droite de l'écran





IMPORTANT

Veillez à ce que Bluetooth® soit activé sur le lecteur de glycémie et le smartphone

Sur un lecteur OneTouch Select Plus Flex® :

- Allumer le lecteur avec un appui long sur **OK**
- Appuyer sur les boutons **OK + ^**
- Le symbole  est allumé en haut à droite de l'écran

Appairer votre lecteur de glycémie

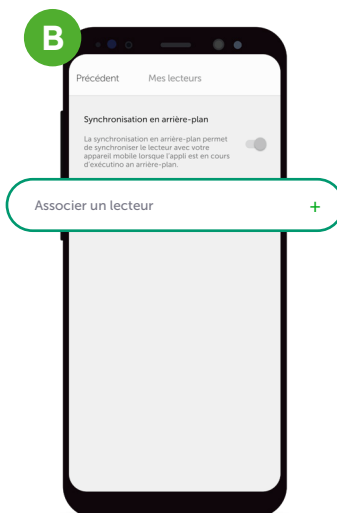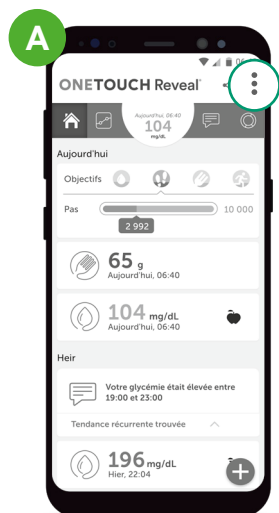



Avec un lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect®



Avec un lecteur de glycémie OneTouch Select Plus Flex®



Et vous voilà lancé !
Vous pouvez maintenant commencer
à synchroniser vos données.






ETAPE 4

Partager vos progrès avec votre professionnel de santé

Option 1 :

Utiliser le code établissement de votre professionnel de santé pour un partage simplifié et automatique de vos données.*

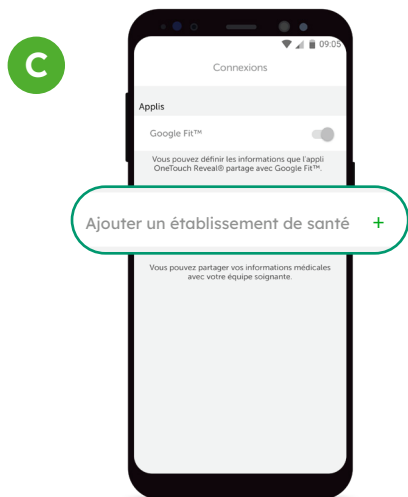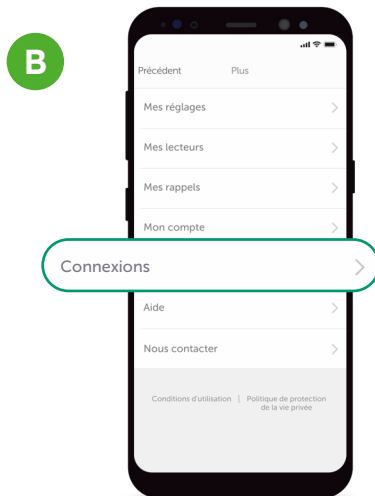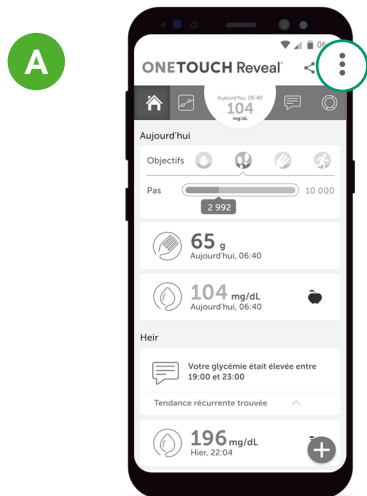


* Le code établissement vous sera donné par votre médecin ou un membre de votre équipe soignante. Une fois renseigné dans votre application mobile OneTouch Reveal®, avec votre accord, ce code vous permettra de partager automatiquement vos données de santé avec votre équipe médicale par le biais d'une connexion cloud sécurisée. Ce partage pourra se faire après synchronisation de votre lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect® ou OneTouch Select Plus Flex® avec votre application mobile OneTouch Reveal®.



Option 2 :

Imprimer le rapport de vos dernières données de santé ou partager ce rapport par e-mail."


A

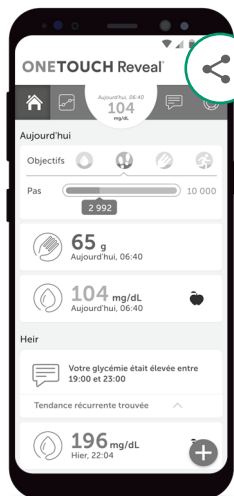


B



C

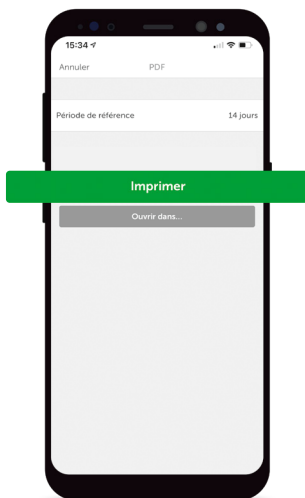

D

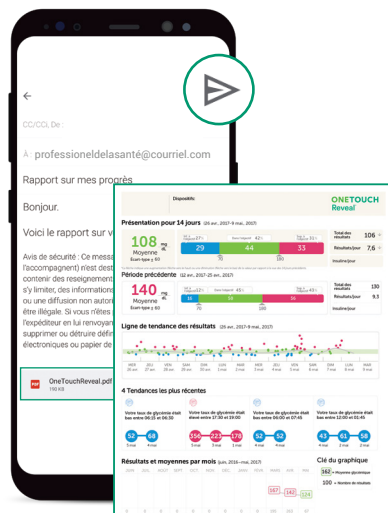

"Si vous le préférez, vous pouvez imprimer ou partager un rapport de vos dernières données de santé par e-mail. Ce rapport est généré depuis votre application mobile OneTouch Reveal® dans un format PDF. Il vous suffit alors de l'imprimer ou de l'envoyer par e-mail, à votre équipe médicale, en cliquant sur le lien de l'application mail paramétré sur votre smartphone.



Configuration de l'application pour un smartphone sous iOS

ETAPE 1

Télécharger l'application mobile OneTouch Reveal®




Vous avez un smartphone sous Android ?
Rendez-vous à la page 4 pour la configuration.

A



Trouvez l'icône de l'App store sur votre appareil Apple


B

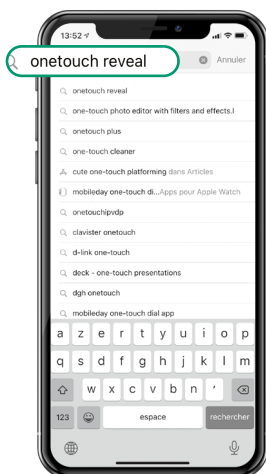

C



D

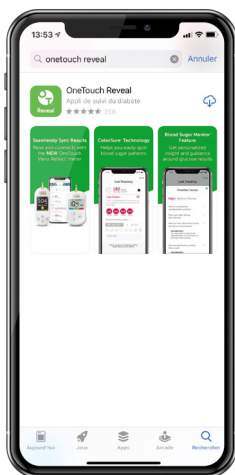


E






ETAPE 2


Créer un compte OneTouch Reveal® et compléter obligatoirement les informations suivantes :

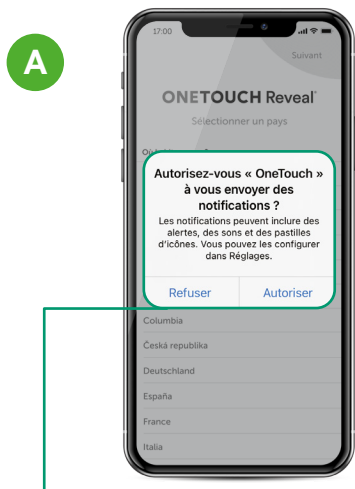


Vous avez le choix mais, afin de profiter au maximum des avantages de l'application mobile OneTouch Reveal®, sélectionnez « **Autoriser** ». L'application vous enverra des notifications.

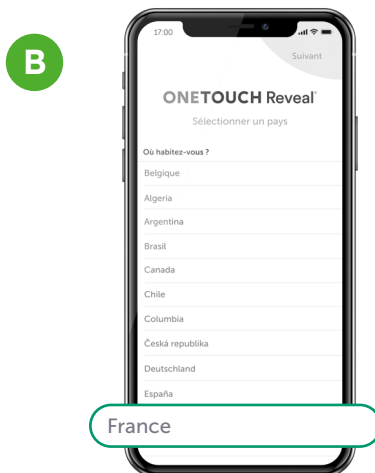

Choisir « **France** »
comme Pays de résidence

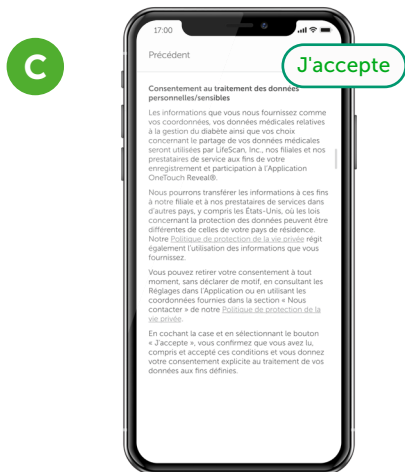

Accepter le « **Consentement au traitement des données personnelles/sensibles** »

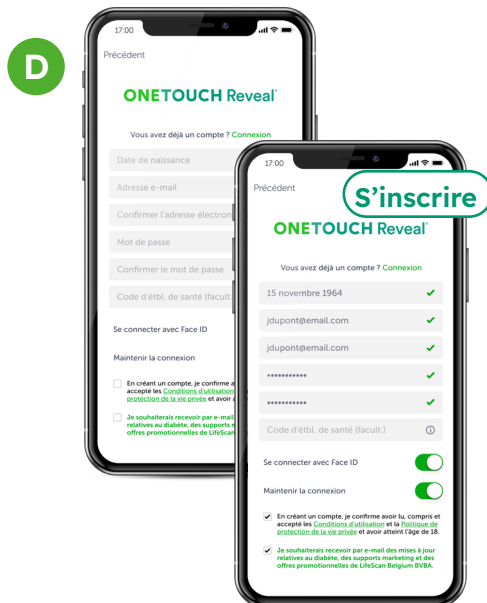




ETAPE 3

Connecter le lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect® ou OneTouch Select Plus Flex® avec l'application mobile OneTouch Reveal® par Bluetooth

Activer le Bluetooth du lecteur de glycémie

Sur un lecteur OneTouch Verio Reflect® :


- Allumer le lecteur avec un appui long sur **OK**
- Dans le menu lecteur, choisir **Réglages** puis **Bluetooth®**
- Sélectionner **Activé** et appuyer sur **OK**
- Appuyer sur le bouton retour ↶ pour retourner sur l'écran d'accueil du lecteur
- Le symbole  est allumé en haut à droite de l'écran



IMPORTANT

Veillez à ce que Bluetooth® soit activé sur le lecteur de glycémie et le smartphone

Sur un lecteur OneTouch Select Plus Flex® :

- Allumer le lecteur avec un appui long sur **OK**
- Appuyer sur les boutons **OK + ^**
- Le symbole  est allumé en haut à droite de l'écran

Appairer votre lecteur de glycémie





Avec un lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect®



Avec un lecteur de glycémie OneTouch Select Plus Flex®



Et vous voilà lancé !
Vous pouvez maintenant commencer
à synchroniser vos données.





ETAPE 4

Partager vos progrès avec votre professionnel de santé

Option 1 :

Utiliser le code établissement de votre professionnel de santé pour un partage simplifié et automatique de vos données.*



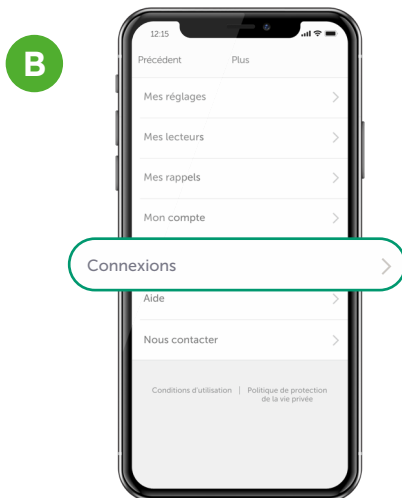
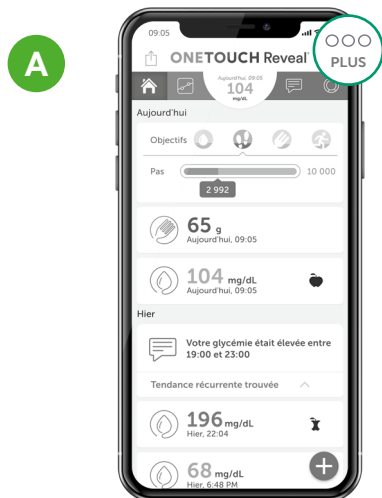


* Le code établissement vous sera donné par votre médecin ou un membre de votre équipe soignante. Une fois renseigné dans votre application mobile OneTouch Reveal®, avec votre accord, ce code vous permettra de partager automatiquement vos données de santé avec votre équipe médicale par le biais d'une connexion cloud sécurisée. Ce partage pourra se faire après synchronisation de votre lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect® ou OneTouch Select Plus Flex® avec votre application mobile OneTouch Reveal®.



Option 2 :

Imprimer le rapport de vos dernières données de santé ou partager ce rapport par e-mail.**

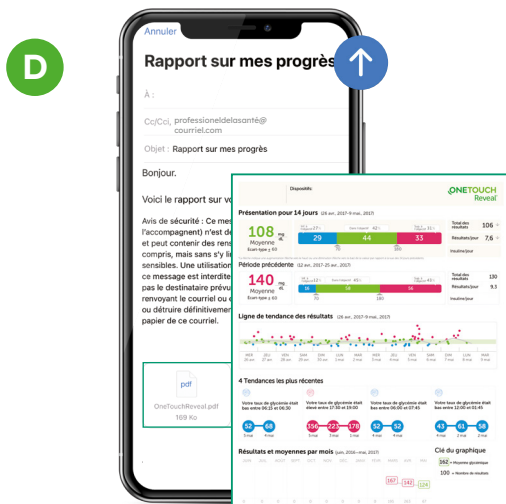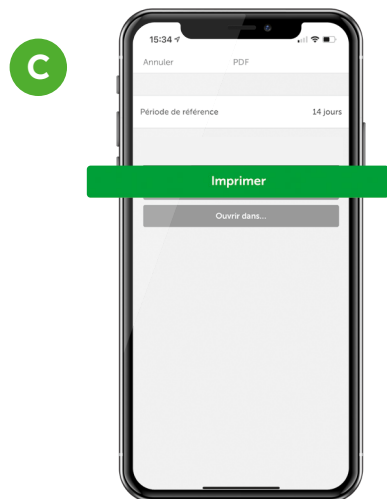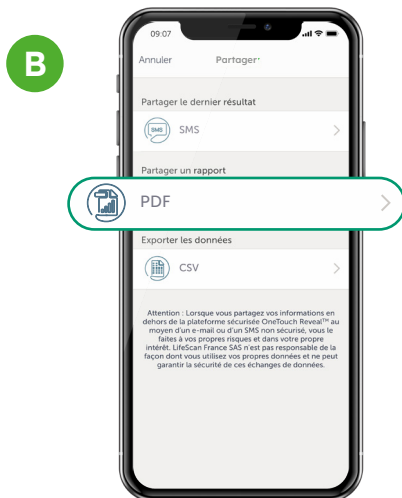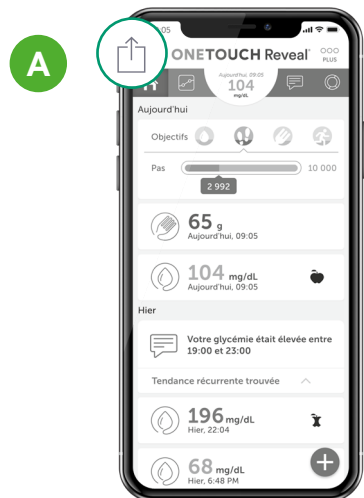

**Si vous le préférez, vous pouvez imprimer ou partager un rapport de vos dernières données de santé par e-mail. Ce rapport est généré depuis votre application mobile OneTouch Reveal® dans un format PDF. Il vous suffit alors de l'imprimer ou de l'envoyer par e-mail, à votre équipe médicale, en cliquant sur le lien de l'application mail paramétré sur votre smartphone.



Code d'établissement santé*
A renseigner ici par votre professionnel de santé :

--	--	--	--	--	--

Pour toute question sur le fonctionnement de l'application mobile
OneTouch Reveal® ou les lecteurs de glycémie OneTouch®



www.gammeOneTouch.fr



contact.fr@onetouch.com



0 800 459 459

Service & appel
gratuits


du lundi au vendredi de 8h à 18h

Pour plus d'information, et avant toute utilisation, veuillez lire le manuel d'utilisation et la notice des produits. Vous pouvez également demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien

ONETOUCH®

* Le code établissement permet à votre professionnel de santé d'accéder à vos données issues de l'application

10/2023. L'application OneTouch Reveal® – disponible en option – est destinée aux patients atteints de diabète, et est conçue pour recueillir et présenter les résultats des lecteurs de glycémie LifeScan. OneTouch Reveal® ne se substitue pas aux conseils des professionnels de santé. Lire attentivement la notice. Le lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect® et les bandelettes réactives OneTouch Verio®, ainsi que le lecteur de glycémie OneTouch Select Plus Flex® et les bandelettes réactives OneTouch Select Plus®, sont des dispositifs d'AutoSurveillance Glycémique (ASG) destinés aux personnes atteintes de diabète. L'ASG est employée lorsqu'elle est susceptible d'entraîner une modification de la thérapeutique ; elle doit être systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients dans le diabète de type 2. Elle nécessite une éducation avec un professionnel de santé. Lire attentivement la notice. En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contacter votre professionnel de santé. Ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

 LifeScan Europe GmbH (Zug - Suisse)
2310LFSGP002

  LifeScan Deutschland GmbH (Düsseldorf - Allemagne)

© 2022-2023 LifeScan IP Holdings, LLC - FR-DMV-2300004 -

Document remis par le professionnel de santé à l'utilisateur du dispositif.

LifeScan France SAS - 23 rue François Jacob - 92500 Rueil-Malmaison - S.A.S. au capital de 11 500 001 € -
839 988 920 R.C.S. Nanterre.



LE TRI
+ FACILE

